




Contour LINK

SISTEMA INALÁMBRICO PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE

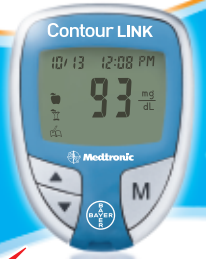

NO NECESITA CÓDIGO



GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA



Medidor **CONTOUR® LINK:**



- Pantalla de visualización**
- Botón de memoria (Encender/ Apagar, Recuperar la memoria, Validar)**
- Botones de desplazamiento Arriba/Abajo**
- Puerto para la tira reactiva**


Tira reactiva **CONTOUR®:**



- Extremo gris del electrodo:** El extremo de la tira reactiva que se introduce en el puerto para la tira reactiva del medidor (extremo gris hacia arriba).
- Punta para muestra:** El extremo de la tira reactiva en el que se recoge la sangre.

REALIZAR EL ANÁLISIS DE SANGRE

*Antes de empezar, asegúrese de que la opción **Enviar del medidor** está activada (la flecha de **Enviar** se muestra a la derecha de la fecha en la ventana de visualización). Compruebe el estado de las baterías y lávese las manos antes de realizar el análisis.*

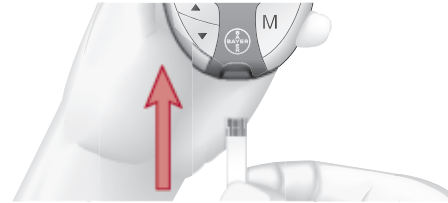


- Sujete la tira reactiva** con el extremo gris hacia arriba. Introduzca el extremo gris de la tira reactiva en el puerto para la tira reactiva.



El medidor se encenderá y una tira reactiva con una gota de sangre parpadeante le indicará que el medidor está listo para realizar el análisis.

- Obtener la gota de sangre.** Consulte la guía del usuario o el folleto de **MICROLET®2** de Bayer para obtener las instrucciones.

- Ponga en contacto inmediatamente la punta** de la tira reactiva con la gota de sangre. La sangre se recoge en la tira reactiva a través de la punta.

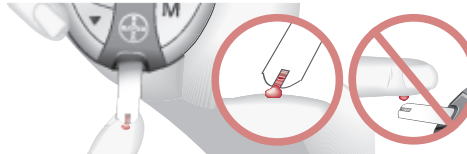

Mantenga la tira en contacto con la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.



El resultado se muestra tras una cuenta atrás de cinco segundos. Parpadeará para indicar que se está transmitiendo al dispositivo Medtronic compatible.

Importante: Compruebe siempre la pantalla del dispositivo Medtronic para asegurarse de que el resultado de glucosa que se muestra coincide con el de la pantalla del medidor.

Para configurar la función de enlace en el dispositivo Medtronic, consulte el apéndice del dispositivo Medtronic que hay en la caja del dispositivo.

Para **detener la transmisión de un resultado** (si el dispositivo Medtronic no lo acepta en 5 segundos), pulse **M**. La transmisión se cancelará. (El resultado no se puede volver a enviar más tarde.)

Para **ver las instrucciones de los marcadores**, consulte la **otra cara**. Debe marcar los resultados mientras aún se muestran (**antes** de extraer la tira reactiva o apagar el medidor). Los marcadores se mostrarán después de que se haya enviado el resultado (o de que se haya cancelado la transmisión).

DESACTIVAR LA OPCIÓN **ENVIAR** PARA UN SOLO RESULTADO

Si **NO** quiere enviar el resultado de un análisis de sangre al dispositivo Medtronic, puede desactivar la opción **Enviar** para un solo análisis.


- Introduzca la tira reactiva para encender el medidor. **Antes de comenzar con el análisis**, pulse y mantenga pulsado el botón **▲** o **▼** hasta que aparezca **OFF**. El símbolo **↑** que se muestra junto a la fecha desaparecerá.
- Realice el análisis de sangre como habitualmente. El resultado no parpadeará, lo que indica que no se está enviando.
- Cuando encienda el medidor para realizar otro análisis, la opción **Enviar** volverá a estar activada.

Consulte la guía del usuario para ver una lista completa de códigos de error y símbolos.

¿Necesita ayuda? Servicio de atención al cliente de Bayer Diabetes: 1-800-348-8100 (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana).

LO QUE VE	LO QUE SIGNIFICA	LO QUE DEBERÍA HACER
 (permanecerá en la pantalla)	Baterías bajas.	Cambie las baterías lo antes posible para evitar el riesgo de que el resultado de un análisis no se almacene en el medidor.
 (parpadeará durante 10 segundos y luego se apagará el medidor)	Baterías agotadas.	Cambie las baterías de inmediato para evitar el riesgo de que el resultado de un análisis no se almacene en el medidor.
E1 	Temperatura fuera de rango.	Vaya a una zona que esté dentro del rango de funcionamiento del medidor (5 °C – 45 °C; 41 °F – 113 °F). Deje que el medidor se ajuste a esta temperatura durante 20 minutos antes de realizar un análisis.
E2 	La tira reactiva no se ha llenado con la sangre suficiente para realizar un análisis con precisión.	Extraiga la tira reactiva y repita el análisis con una tira reactiva nueva.
E3 	El medidor detecta una tira reactiva usada o se aplicó la sangre antes de que el medidor estuviera listo.	Extraiga la tira reactiva y repita el análisis con una tira reactiva nueva. Espere hasta que vea en pantalla el símbolo de la gota de sangre parpadeando antes de agregar la muestra de sangre.
E4 o E7 	La tira reactiva no se ha introducido correctamente o la tira reactiva no es correcta.	Extraiga la tira reactiva y vuelva a introducirla correctamente. Utilice únicamente tiras reactivas CONTOUR .
HI o LO	HI = El resultado del análisis es superior a 600 mg/dl; LO = El resultado del análisis es inferior a 10 mg/dl.	Lávese las manos y el lugar del análisis. Repita el análisis utilizando una tira reactiva nueva. Si el resultado sigue siendo "HI" o "LO" , póngase en contacto con su médico o profesional sanitario inmediatamente.
ADVERTENCIA: Los niveles de glucosa superiores a 250 mg/dl o inferiores a 50 mg/dl pueden indicar un problema de salud posiblemente grave.		
El resultado del análisis sigue parpadeando durante 60 segundos y luego para.	El dispositivo Medtronic no ha confirmado la recepción del resultado del análisis en el plazo de 60 segundos.	- Asegúrese de que el dispositivo Medtronic está a una distancia no superior a 4 pies del medidor CONTOUR LINK. - Asegúrese de que el dispositivo Medtronic está configurado para aceptar los resultados del medidor y que el ID del medidor se ha programado en el dispositivo. - Compruebe la pantalla del dispositivo Medtronic para determinar si el dispositivo ha recibido el resultado de glucosa. Si no es así, puede introducir el resultado del análisis manualmente. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bayer Diabetes Care.

MARCADORES Y ALARMA

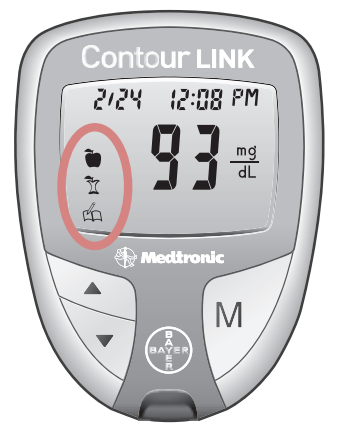

Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Antes de las comidas
 Marca el resultado de un análisis que se realizó antes de una comida.

Después de las comidas
 Marca el resultado de un análisis que se realizó después de una comida.

Registro
 Marca un resultado como excepcional o diferente por algún motivo.


PARA NO MARCAR RESULTADOS

Pulse **M** o extraiga la tira reactiva usada.

O

Pulse **▲** o **▼** hasta que desaparezcan los tres marcadores.

Pulse **M** y extraiga la tira reactiva usada.

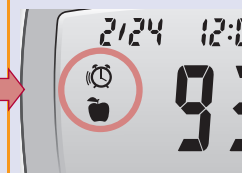
PARA MARCAR RESULTADOS	VERÁ	PARA ESTABLECER LA CONFIGURACIÓN	VERÁ	LO QUE SIGNIFICA
 Antes de las comidas Pulse ▲ o ▼	 (ACTIVADO)	Pulse M		El resultado se marca como un análisis antes de las comidas. Ahora puede configurar una alarma de recordatorio de análisis.
 Alarma Pulse ▲ o ▼	 (ACTIVADO)	Pulse M		La alarma está configurada para apagarse en el tiempo seleccionado (de 1.0 a 2.5 horas) con el fin de recordarle que realice un análisis después de comer.
 Después de las comidas Pulse ▲ o ▼	 (ACTIVADO)	Pulse M		El resultado se marca como un análisis después de las comidas.
 Registro Pulse ▲ o ▼	 (ACTIVADO)	Pulse M		El resultado se marca en la memoria como excepcional. Debe anotarlo en su registro.

CUANDO SUENA LA ALARMA

- El medidor se enciende automáticamente.
- Pulse cualquier botón una vez para silenciar la alarma y dos veces para apagar el medidor.
- Realice un análisis de sangre y márkelo con un  (marcador después de las comidas) (consulte el gráfico de la izquierda).

VERÁ

El resultado del análisis de sangre antes de la comidas.

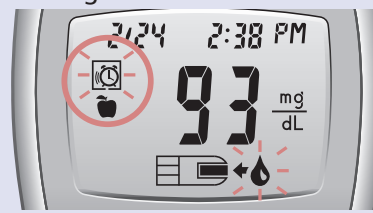

PARA REVISAR LOS RESULTADOS

Pulse M: la media de 14 días aparecerá en la pantalla.

Pulse ▲ para ver el total de 7 días.

Pulse ▼ para revisar los resultados previamente almacenados.

Pulse **▲** o **▼** para avanzar y retroceder a través de los resultados. Puede pulsar y soltar el botón para ver los resultados almacenados uno cada vez o puede mantenerlo pulsado para moverse por los resultados de modo continuo.

Cuando aparezca **End** en la pantalla, significará que ha visualizado todos los resultados de la memoria.

Pulse M para desactivar el medidor.

Para obtener las instrucciones de uso completas, incluidas las de limpieza y desinfección del medidor y del dispositivo de punción, consulte la guía del usuario del medidor.

ADVERTENCIA

- El medidor y el dispositivo de punción son de un solo uso en un solo paciente. ¡No los comparta ni siquiera con otros miembros de su familia! ¡No lo utilice en varios pacientes!
- Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección.



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
 Mishawaka, IN 46544 USA

¿Necesita ayuda?

Bayer Diabetes Care

Servicio de atención al cliente: 1-800-348-8100
 (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana)

www.bayerdiabetes.com/us

Bayer, la cruz de Bayer, *CONTOUR*, *MICROLET* y el logotipo de No Necesita Código son marcas registradas de Bayer. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

© 2012 Bayer.

84473201 Todos los derechos reservados. Rev. 05/12

Bayer