



**Contour.usb**  
SISTEMA PARA ANÁLISIS DE  
GLUCOSA EN SANGRE

## GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA



PARA USO CON LAS  
TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA  
EN SANGRE CONTOUR® DE BAYER

Consulte la Guía del usuario del medidor CONTOUR® USB, el folleto de instrucciones de MICROLET®2 y la Guía de inicio rápido de GLUCOFACTS® DELUXE para más información.

Llame al número **800-348-8100** si tiene cualquier duda o visite la página web [www.bayerdiabetes.com/us](http://www.bayerdiabetes.com/us)

Para uso diagnóstico "in vitro"



Bayer HealthCare

Bayer, la Cruz de Bayer, CONTOUR, GLUCOFACTS, MICROLET y el logotipo de NO NECESITA CÓDIGO son marcas comerciales de Bayer.

Bayer HealthCare LLC  
Mishawaka, IN 46544 USA

82286137

Rev. 8/09

Tira reactiva  
CONTOUR®

Medidor  
CONTOUR® USB

Lanceta  
MICROLET®

Dispositivo de punción  
MICROLET®2

**PRECAUCIÓN:** El dispositivo de punción está destinado al uso en un solo paciente.

Antes de utilizar el medidor por primera vez, conéctelo al cargador de pared o al ordenador para cargarlo y configurarlo. El ordenador debe estar encendido. Una vez cargado, retire el medidor para comenzar a utilizarlo.




**1** Lávese las manos y séquelas completamente.




**2** Introduzca la lanceta en el dispositivo de punción y desenrosque la cubierta protectora hasta retirarla.




**3** Gire el cilindro de graduación hasta seleccionar la profundidad de punción que desee.

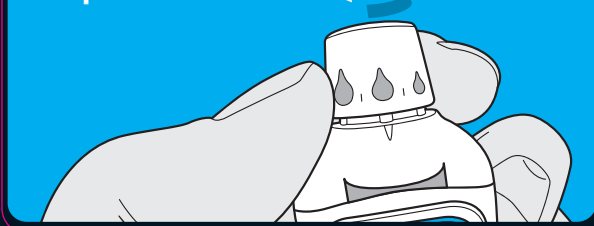

**4** Introduzca una tira reactiva CONTOUR® para encender el medidor.

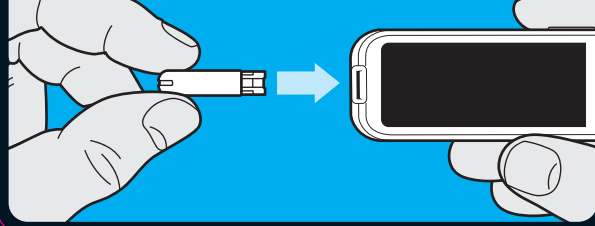


**5** Coloque el dispositivo sobre el lugar de punción y pulse el botón.

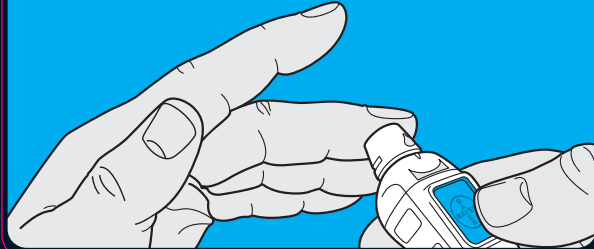


**6** Ponga en contacto la gota de sangre con la punta de la tira reactiva CONTOUR.




**7** Seleccione Antes Comer o Desp. Comer.

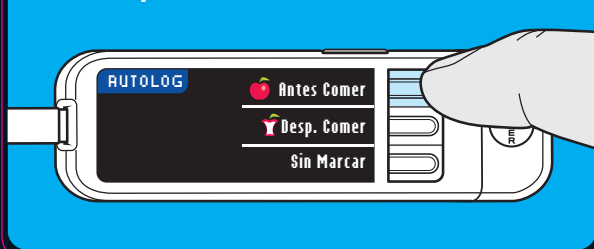

**8** A continuación, aparece en pantalla el resultado de la prueba.

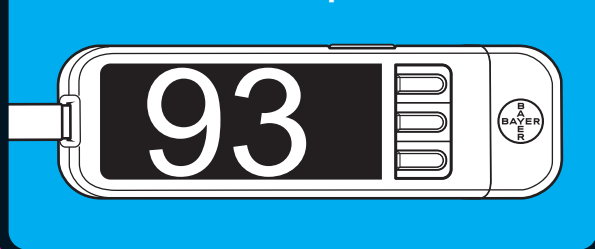

**9** Opcional: Seleccione Recordar o Notas.

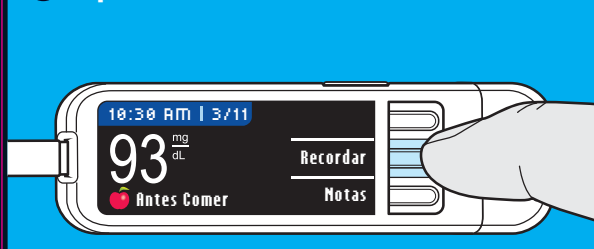

**10** Extraiga la tira reactiva CONTOUR para apagar el medidor.



**11** Conéctelo para ver sus resultados de azúcar en sangre.



**12** ¡Actúe en consecuencia!

