

Contour next link

Sistema inalámbrico para análisis de glucosa en sangre



Utiliza únicamente las tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT

NO NECESITA CÓDIGO

ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA



VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Pantalla de visualización

Botón superior
Menú

Conector USB

Tapa de protección de USB

Puerto para la tira reactiva

Botones de selección/
desplazamiento

NOTA: Compruebe las unidades de medida del medidor. Consulte la guía del usuario del medidor para ver las instrucciones completas.

86591703 Rev. 12/16

Para ver una lista completa de las advertencias importantes y de las limitaciones de su sistema, consulte las secciones de INDICACIONES DE USO, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES de la guía del usuario de su medidor CONTOUR®NEXT LINK.

Configuración inicial de medidor y conexión con la bomba de insulina MiniMed® compatible


Cargando el medidor

- 1 Quite la tapa del USB para ver el conector USB.** El medidor CONTOUR®NEXT LINK tiene una batería recargable permanente. **Antes de hacer nada más**, cargue el medidor con el cargador de pared que se incluye en el kit o conectando el conector USB a un ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido. El medidor mostrará brevemente "No realizar análisis-Cargando" y la luz del puerto para la tira reactiva parpadeará. **No puede realizar un análisis de glucosa en sangre mientras se carga la batería.** Cuando finalice la carga, la luz del puerto para la tira reactiva se apagará. Desconecte el medidor CONTOUR NEXT LINK para realizar el análisis.



Configuración del medidor

- 2** Para comenzar la configuración, mantenga pulsado el botón Menú durante varios segundos hasta que el medidor se encienda.
- 3** Elija el idioma y pulse **OK**.
- 4** Pulse **OK** en la pantalla siguiente para comenzar el proceso de conexión. **NOTA:** Bomba hace referencia a la bomba de insulina MiniMed compatible.
- 5 DETENER. NO pulse NINGÚN botón.** Esta pantalla muestra el número de ID del medidor (en la esquina inferior izquierda). El ID es necesario para completar el proceso de conexión. Deje el medidor. Coja la bomba de insulina MiniMed compatible y continúe con el paso 6.

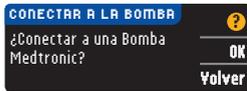

Utilice los botones de las flechas arriba y abajo para introducir el ID de seis caracteres del medidor que se muestra en la pantalla.



Pulse **ACT** después de la entrada de cada número.



- 12** Seleccione Revisar ID en la bomba de insulina MiniMed compatible con el medidor para confirmar que el ID del medidor CONTOUR®NEXT LINK se ha introducido correctamente. Si es incorrecto, vuelva al paso 9.



NOTA: Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía del usuario de la bomba de insulina MiniMed compatible.




- 13** Vuelva al medidor CONTOUR NEXT LINK. Cuando haya introducido el ID del medidor en la bomba de insulina MiniMed compatible, pulse **OK**.



Elegir las opciones de envío del medidor

- 14 OPCIONES DE ENVÍO** controla cómo enviará el medidor las lecturas de glucosa en sangre a la bomba de insulina MiniMed compatible. Elija la **OPCIÓN DE ENVÍO** que más se adecue a su caso. **Siempre** = El medidor siempre envía los resultados. **Confirmar** = El medidor le preguntará antes de enviar los resultados. **Nunca** = El medidor no enviará nunca los resultados.

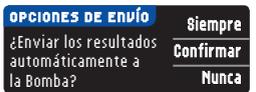



Configurar la fecha y hora del medidor para que coincida con las de la bomba de insulina MiniMed compatible.

- 15** La fecha y la hora del medidor debe coincidir con la fecha y la hora de la bomba de insulina. Coja la bomba de insulina. Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese hasta **Utilidades** y pulse **ACT**. Desplácese hasta **Fecha y hora** y pulse **ACT**. Seleccione un formato horario y pulse **ACT**. Anote la fecha y la hora. Vuelva al medidor. Siga las instrucciones del medidor para cambiar la fecha y la hora para que coincidan con las de la bomba de insulina.




Conectar el medidor a la bomba de insulina MiniMed compatible

- 6** Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese hasta **Utilidades** pulsando la flecha hacia abajo. Pulse **ACT**.
- 7** Desplácese hasta **Conectar dispositivos** desde el **MENÚ UTILIDADES** y pulse **ACT**. Luego desplácese hasta **Medidores** y pulse **ACT**.
- 8** Seleccione **Activado** y pulse **ACT**. Si está **sustituyendo** un medidor, vaya al **Paso 9**. Si está **agregando** un medidor nuevo, vaya al **Paso 11**.
- 9** Si está reemplazando un medidor, seleccione **Eliminar ID** y pulse **ACT**.
- 10** Si tiene varios ID de medidores, repita el paso 9 para cada uno de ellos.
- 11** Para agregar un medidor nuevo, seleccione **Agregar ID** y pulse **ACT**. Consulte el paso 5 (o mire en la parte trasera del medidor) para encontrar el ID del medidor.

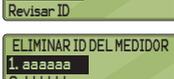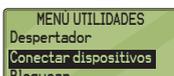

Configuraciones adicionales del medidor

- 16** Elija la configuración para **AUTOLOG**. **AUTOLOG** siempre permite marcar un análisis como **Antes Comer**, **Desp. Comer** o **Sin Marcar**.
- 17** El medidor está configurado de fábrica con los intervalos objetivo predeterminados de glucosa en sangre que se muestran. **Aceptar** los intervalos objetivo predeterminados de glucosa en sangre o **Cambiar** después de hablar con su profesional sanitario.
- 18** Siga las indicaciones de la pantalla para configurar los **Límites alto y bajo** del medidor. Elija **Aceptar** para usar la configuración predeterminada (250 mg/dL para el límite alto y 70 mg/dL para el límite bajo del medidor). Elija **Cambiar** si desea utilizar otros límites diferentes.

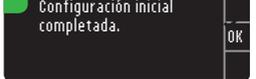

NOTA: Los Límites alto y bajo solo se pueden configurar fuera de los intervalos Objetivo seleccionados. Los objetivos solo se pueden configurar dentro de los Límites alto y bajo. Para obtener información adicional, puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente en el 800-348-8100, disponible de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche, hora del Este.

LA CONFIGURACIÓN HA FINALIZADO.

? = Ayuda



Tira reactiva
CONTOUR®NEXT



Dispositivo de punción



Lanceta



Medidor de
glucosa en sangre
CONTOUR®NEXT LINK

ADVERTENCIA:


- El medidor, el dispositivo de punción y las lancetas son para uso en un solo paciente. No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia. No los use en más de una persona.^{1,2}
- Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección.
- Lávese siempre bien las manos con agua y jabón, y séquelas bien, antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Para ver las instrucciones completas sobre la limpieza y la desinfección del medidor y el dispositivo de punción, consulte la guía del usuario del medidor.


Realizar el análisis de sangre

Obtener la gota de sangre

- 1 Introduzca la tira reactiva y espere a que aparezca el mensaje **APLIQUE SANGRE**.

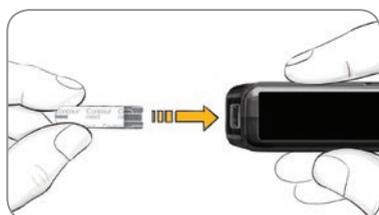


- 2 Saque la cápsula del dispositivo de punción. Introduzca una lanceta en el dispositivo de punción y gire la cubierta protectora para quitarla.

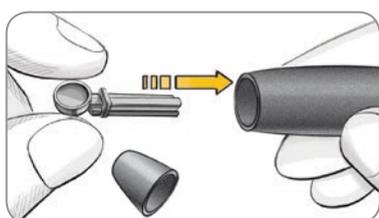


Los gráficos del dispositivo de punción se ofrecen solamente como ilustración. El dispositivo de punción que usted utilice puede tener un aspecto diferente. Consulte las instrucciones detalladas sobre cómo preparar el dispositivo de punción en el folleto correspondiente.

- 3 Vuelva a poner la cápsula de punción y ajústela a la profundidad de punción deseada.

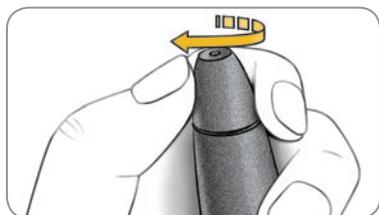


- 4 Obtenga una gota de sangre.

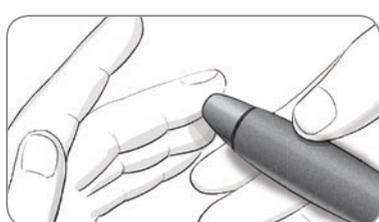

Realizar el análisis de la gota de sangre

- 5 Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor emitirá dos pitidos y la pantalla mostrará **MUESTRA INSUFICIENTE**. Dispone de unos 30 segundos para aplicar más sangre en la misma tira reactiva.

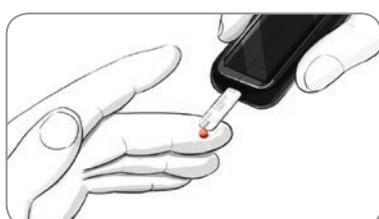

- 6 Si AUTOLOG está activado, puede optar por registrar su resultado como: **Antes Comer**, **Desp. Comer** o **Sin Marcar** para el resultado del análisis.



Referencias

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Enviar los resultados a una bomba de insulina MiniMed compatible

- 7 Si se ha seleccionado **Confirmar** o **Siempre** en **Opciones de envío** durante la **Configuración**, los resultados se pueden enviar a una bomba de insulina MiniMed compatible. Pulse **OK** para pasar a la siguiente pantalla.



Recordatorio y notas

- 8 Seleccione **Recordar** para configurar un recordatorio para el siguiente análisis. Seleccione **Notas** para agregar más información al resultado. Extraiga la tira reactiva.



Apague el medidor

- 9 Extraiga la tira reactiva y el medidor se apagará en 3 minutos. O mantenga pulsado el botón Menú para apagar el medidor.



Consulte la guía del usuario de CONTOUR NEXT LINK y la guía del usuario de la bomba de insulina MiniMed compatible para obtener instrucciones completas.

Llame al **800-348-8100** (disponible de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche, hora del Este) para consultar cualquier pregunta que tenga

o visite www.diabetes.ascensia.com

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte: www.patents.ascensia.com

Exclusivamente para diagnóstico in vitro



Distribuidor:
Ascensia Diabetes Care US Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054

Ascensia, el logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts y el logotipo No Coding (No Necesita Código) son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed, Paradigm y Revel son marcas comerciales y/o marcas registradas de Medtronic MiniMed, Inc.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.

