



Contour next

Sistema para análisis de glucosa en sangre



NO NECESITA CÓDIGO

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Medidor CONTOUR®NEXT



Tira reactiva CONTOUR®NEXT

PRECAUCIÓN: Utilice exclusivamente tiras reactivas CONTOUR NEXT de Bayer con el medidor CONTOUR NEXT.

Encender o apagar el medidor

- Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** hasta que el medidor se encienda o se apague.
- El medidor se encenderá al introducir una tira reactiva en el puerto para la tira reactiva.

Botones de desplazamiento arriba / abajo y OK

- Los botones de desplazamiento **▲** o **▼** le permiten cambiar valores u opciones de uno en uno. Puede mantener pulsado el botón **▲** o **▼** para desplazarse.
- Pulse el botón **OK** para seleccionar la opción resaltada.
- Para salir de Registro o Tendencias y volver al Menú Principal, pulse el botón **OK**.
- Para salir de la Configuración y volver al Menú Principal, desplácese hacia abajo hasta **Menú Principal** y pulse el botón **OK**.

Configuración inicial del medidor


Es necesario configurar el medidor antes de realizar el primer análisis de glucosa en sangre.



Una pantalla confirma su elección. Pulse el botón **OK** para continuar.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** hasta que el medidor se encienda.




2. Si fuera necesario, pulse el botón **▼** para resaltar el idioma deseado. Desplácese hacia abajo para ver más idiomas. Pulse el botón **OK** para confirmar su elección.

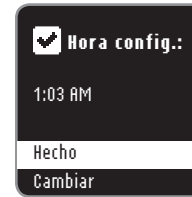

3. Se mostrará la hora y puede elegir **Aceptar** o **Cambiar**. Para cambiar la hora, utilice el botón **▼** para seleccionar **Cambiar** y pulse el botón **OK**. Utilice los botones **▲** o **▼** para cambiar los valores y pulse el botón **OK** para pasar al siguiente elemento.

Una pantalla confirma su elección. Pulse el botón **OK** para pasar a la configuración de la fecha.




4. Se mostrará la fecha y puede elegir **Aceptar** o **Cambiar**. Para cambiar la fecha, utilice el botón **▼** para seleccionar **Cambiar** y pulse el botón **OK**. Utilice los botones **▲** o **▼** y pulse el botón **OK** para pasar al siguiente elemento.

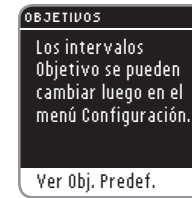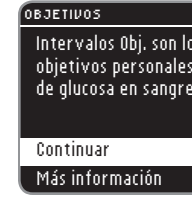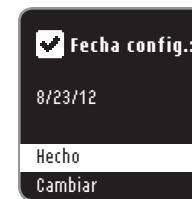

Quando haya realizado la selección, una pantalla confirmará la fecha elegida. Pulse el botón **OK** para pasar a Objetivos.

5. Pulse el botón **OK** para continuar.

6. Cuando haya completado la configuración inicial, puede cambiar los intervalos del Objetivo mediante el menú de Configuración. Pulse el botón **OK** para continuar.

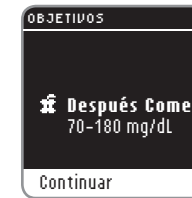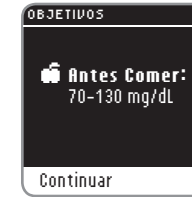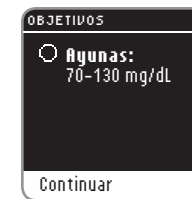

7. Pulse el botón **OK** para continuar con el intervalo Objetivo Antes Comer.

8. Pulse el botón **OK** para continuar con el intervalo Objetivo Después Comer.

9. Pulse el botón **OK** para **completar la configuración inicial**. Ahora puede medir su glucosa en sangre.

Análisis de glucosa en sangre - en la yema del dedo

PRECAUCIÓN


Lávese siempre las manos con agua y jabón, y séquelas cuidadosamente antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.



1. Retire la cápsula de punción del dispositivo de punción MICROLET®2.



2. Afloje la cubierta protectora redonda de la lanceta mediante un giro de 1/4 de vuelta, pero no la retire.

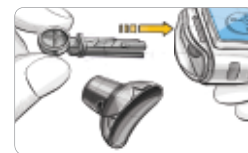

3. Introduzca con firmeza la lanceta en el dispositivo de punción hasta que se detenga.



4. Gire la cubierta protectora redonda de la lanceta para separarla.



5. Vuelva a colocar la cápsula de punción gris.




6. Ajuste el cilindro de graduación de la cápsula de punción a la profundidad de punción preferida.



7. Introduzca el extremo cuadrado gris en el puerto para la tira reactiva.

El medidor se encenderá y aparecerá la pantalla **Aplicar sangre**. El medidor ya está listo para realizar el análisis.

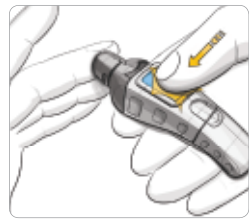

Aplique un masaje en la mano y el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota de sangre.



Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor emitirá dos pitidos. Dispone de unos 30 segundos para recoger más sangre en la misma tira reactiva. Siga las instrucciones de la pantalla del medidor.

8. Presione la cápsula de punción firmemente contra el lugar de punción y presione el botón azul de expulsión con el dedo pulgar.

9. Ponga en contacto inmediatamente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre.



Si el resultado está por encima o por debajo de los intervalos Objetivo configurados, verá siempre el resultado sin necesidad de pulsar ningún botón.

11. Para ver las opciones de configuración de un recordatorio o agregar una nota, pulse el botón **OK** antes de extraer la tira reactiva.

Consulte la guía del usuario para obtener las instrucciones de uso de las opciones. Para apagar el medidor, extraiga la tira reactiva.

10. Aparece la pantalla AutoLog*. Seleccione **Ayunas, Antes Comer, Después Comer o Sin Marcador** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Cuando haya realizado la selección, aparecerá el resultado del análisis.

Ya ha completado el análisis y se ha marcado el resultado del análisis.

PRECAUCIÓN: Para obtener las instrucciones sobre cómo quitar la lanceta del dispositivo de punción, consulte el folleto de MICROLET®2 o la guía del usuario de CONTOUR®NEXT.

Pantalla Menú Principal

1. **Registro** estará resaltado. Para ver el registro, pulse el botón **OK**.



2. Para ver todas las medias y los resúmenes, pulse el botón **▼** para seleccionar **Tendencias** y pulse el botón **OK**.

3. Para cambiar o ajustar la configuración del medidor, seleccione **Configuración** y pulse el botón **OK**.

* El medidor viene con la función AutoLog activada. Consulte la guía del usuario para obtener información sobre la función AutoLog.

El medidor está configurado y bloqueado de fábrica para mostrar los resultados en mg/dL. Si los resultados están en mmol/L, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bayer Diabetes Care, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en el: 1-800-348-8100.

Para obtener información adicional, visite www.bayercontour.com o llame al número gratuito del Servicio de atención al cliente: **1-800-348-8100** (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana).

Lea la guía del usuario de **CONTOUR®NEXT** y el folleto de **MICROLET®2** para obtener instrucciones completas.

Exclusivamente para diagnóstico in vitro



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA
www.bayercontour.com

Posible riesgo biológico

Se considera que todos los sistemas de medición de la glucosa en sangre representan un posible peligro biológico.

Todos los productos y objetos que entren en contacto con la sangre humana deberán manipularse, incluso después de limpiarlos, como potenciales transmisores de enfermedades víricas.

El medidor y el dispositivo de punción son para uso en un solo paciente. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia!

Se considera que todas las partes del kit presentan un posible riesgo biológico y podrían transmitir enfermedades víricas, incluso después de haberlas limpiado y desinfectado.

Lávese siempre las manos con agua y jabón cuidadosamente antes y después de realizar un análisis, manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Bayer, la Cruz de Bayer, CONTOUR y MICROLET son marcas registradas de Bayer. No Necesita Código y el logotipo No Necesita Código son marcas de Bayer. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

© 2012 Bayer. Todos los derechos reservados.