

84821551 Rev. 07/15

Configuración inicial del medidor y conexión a la bomba de insulina MiniMed® 630G

Recarga del medidor

- 1 Saque la tapa del medidor marcada con para descubrir el conector USB.**

El medidor CONTOUR®NEXT LINK 2.4 de Bayer tiene una batería permanente recargable.

Cargue el medidor con el cargador de pared* o conectando el conector USB al ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido.

El medidor mostrará brevemente "No realice análisis-Recargando" y la luz del puerto para la tira reactiva parpadeará. **No puede realizar un análisis de glucosa en sangre mientras se carga la batería.**

Cuando la batería se haya cargado, la luz del puerto para la tira reactiva se apagará. Desconecte el medidor CONTOUR NEXT LINK 2.4 para realizar un análisis.




Desconecte el medidor de la fuente de carga antes de iniciar la configuración

- 2** Para iniciar la configuración, mantenga pulsado el botón superior Menú durante varios segundos hasta que el medidor se encienda.



- 3** Desplácese hacia abajo para seleccionar el idioma. Pulse **OK**.

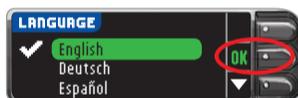


- 4** Pulse **OK** si se muestra el idioma correcto. Pulse **NO** si no se muestra el idioma correcto.

Conexión de la bomba

- 5** Conectar a una Bomba MiniMed? Pulse **OK**.



- 6** Pulse **OK**.

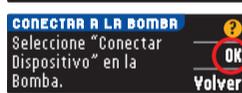

- 7** Deje el medidor y coja la bomba.

Pulse cualquier botón para encender la pantalla y, a continuación, pulse el botón Menú . Utilice el botón de flecha hacia abajo para desplazarse hasta **Utilidades**. Pulse el botón Seleccionar .




Si la pantalla de la bomba se queda en blanco, pulse cualquier botón para volver a encenderla.


- 8** En el menú Utilidades, utilice la flecha hacia abajo para desplazarse hasta **Opciones dispositivo**. Pulse el botón Seleccionar .



- 9** En el menú Opciones dispositivo, desplácese hasta **Conectar dispositivo**. Pulse el botón Seleccionar .

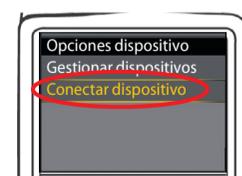

- 10** Coloque el medidor y la bomba uno al lado del otro. Seleccione **Conexión automática** en la bomba.

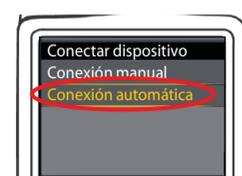

Seleccione **Conexión auto.** en el medidor.




- 11** Lea la pantalla de la bomba y utilice la flecha hacia abajo para desplazarse a la página siguiente.

Utilice los botones de las flechas para desplazarse hasta **Continuar**. Pulse el botón Seleccionar .



- 12** Coloque el medidor y la bomba uno al lado del otro. Seleccione **Buscar** en la bomba.



Seleccione **Buscar** en el medidor.

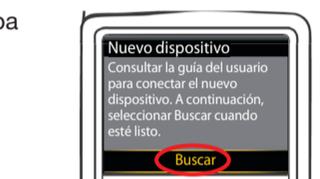

La búsqueda puede tardar hasta dos minutos.



- 13** Compruebe si el número de serie (SN) del dispositivo de la **bomba** coincide con el SN del **medidor**. Si coinciden, desplácese hasta **Confirmar** en la bomba. Pulse el botón Seleccionar .

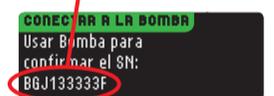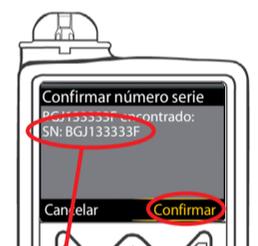

Cuando vincula la bomba al medidor, el número de serie en la pantalla del **medidor** cambia a un número de serie diferente. Este es el número de serie de la **bomba**.

- 14** Dé la vuelta a la bomba. Asegúrese de que el número de serie que aparece en la parte trasera de la **bomba** coincide con el número de serie que aparece ahora en la pantalla del **medidor**. Pulse **Siguiente**.




- 15** Seleccione **Siempre** y pulse **OK** en la pantalla siguiente.



- 16** Seleccione el **Formato fecha**.



- 17** Pulse **OK**.
Nota: Si la fecha y la hora no son correctas, debe cambiarlas en la bomba.

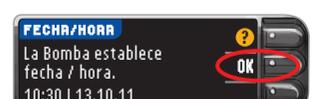


- 18** Pulse **Aceptar** para seleccionar **AutoLog Desactivado**.
La función AutoLog permite marcar un resultado de análisis como En ayunas, Antes Comer o Después Comer. Consulte la guía del usuario para más información.



* Puede que el cargador de pared no esté incluido en todos los kits del medidor. Contacte con el Servicio de atención al cliente para obtener información sobre cómo obtener un cargador de pared.

Dé la vuelta a la página para completar la configuración.

- 19** Puede **Aceptar** o **Cambiar** los niveles de Alertas alta y baja. El medidor le alerta con un sonido cuando el nivel de glucosa en sangre está por encima o por debajo de los niveles configurados.

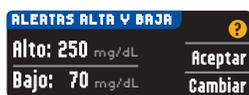

- 20** Puede **Aceptar** o **Cambiar** el intervalo Objetivo. El intervalo Objetivo es el objetivo para sus resultados de análisis de glucosa en sangre.




NOTA: Las Alertas solo se pueden configurar fuera del intervalo Objetivo seleccionado. Los Objetivos solo se pueden configurar dentro del nivel de Alerta seleccionado. Para obtener información adicional, contacte con el Servicio de atención al cliente. Consulte la información de contacto del Servicio de atención al cliente a continuación.

- 21** Ha finalizado la configuración del sistema y ya está listo para realizar un análisis de glucosa en sangre. Vaya al paso 1 a continuación.

✓ Configuración finalizada. Introduzca la tira para empezar un análisis.

Materiales para el análisis

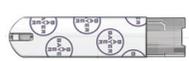

Tira reactiva CONTOUR®NEXT de Bayer



Dispositivo de punción de Bayer



Lanceta de Bayer



Medidor de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT LINK 2.4 de Bayer

⚠ PRECAUCIÓN:


- El medidor, el dispositivo de punción y las lancetas son para uso en un solo paciente. No los comparta con nadie, incluidos otros miembros de la familia. No los utilice en varias personas.^{1,2}
- ⓧ Utilice una nueva lanceta cada vez que realice un análisis, ya que después de su uso deja de ser estéril.
- Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección.
- Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza y desinfección, consulte la guía del usuario del medidor.


Análisis de sangre

Obtención de la gota de sangre

- 1** Introduzca la tira reactiva y espere a que aparezca el mensaje **APLIQUE SANGRE**.

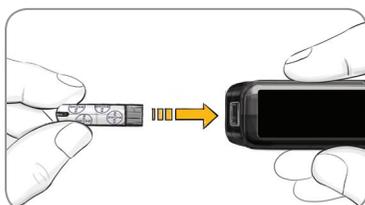


- 2** Quite la cápsula del dispositivo de punción. Introduzca la lanceta firmemente hasta el tope.

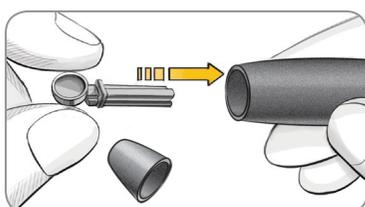


Los gráficos del dispositivo de punción se ofrecen solamente como ilustración. El dispositivo de punción que usted utilice puede tener un aspecto diferente. Consulte el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones detalladas sobre cómo preparar dicho dispositivo.

- 3** Vuelva a colocar la cápsula del dispositivo de punción y ajuste el cilindro de graduación para la profundidad de punción que desee.

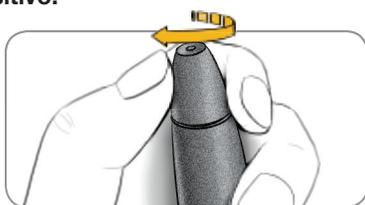


- 4** Obtenga una gota de sangre.

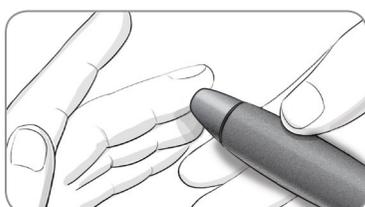

Análisis de la gota de sangre

- 5** Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor pitará dos veces y aparecerá el mensaje **MUESTRA INSUFICIENTE**. Tiene unos 30 segundos para aplicar más sangre en la misma tira.

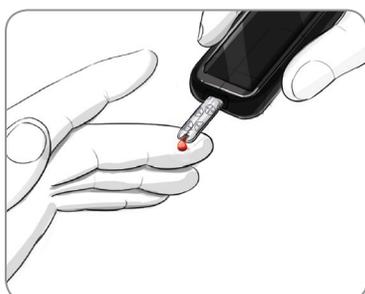

NOTA: Si la función **AutoLog** está activada, se le pedirá que marque su resultado como **En ayunas**, **Antes Comer** o **Después Comer** antes de que se muestre el resultado del análisis. Si el resultado está por encima de la configuración de Alerta alta o por debajo de la configuración de Alerta baja, verá el resultado sin tener que hacer una selección de la función **AutoLog**.

Referencias

- 1 FDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication (2010). <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010). <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick-DevicesBGM.html>

Envío de resultados a la bomba MiniMed

- 6** Si se seleccionó **Siempre** en **Opciones Envío** durante la **Configuración**, los resultados se enviarán directamente a la bomba. Si se seleccionó **Preguntarme** en **Opciones Envío** durante la **Configuración**, puede elegir enviar el resultado a la bomba después de cada análisis de glucosa en sangre.



Pulse **Enviar** o **No enviar**.

ADVERTENCIA: Compruebe siempre la pantalla de la bomba para asegurarse de que el resultado de glucosa coincide con el resultado de glucosa que se muestra en el medidor.

Bolus, Recordar y Notas

- 7** Seleccione **Bolus** para enviar un bolus a la bomba. Seleccione **Recordar** para configurar un recordatorio para el próximo análisis. Seleccione **Notas** para añadir más información al resultado.



Confirme que el resultado se envió a la bomba

- 8** Coja la bomba. Pulse y mantenga pulsado el botón **Atrás** para acceder a la página de inicio. El resultado del análisis de glucosa en sangre debe mostrarse en la pantalla de la bomba.



Apague el medidor

- 9** Extraiga la tira reactiva y el medidor se apagará en 3 minutos. También puede mantener pulsado el botón **Menú** para apagar el medidor.



Consulte la guía del usuario de CONTOUR®NEXT LINK 2.4, el folleto del dispositivo de punción y la guía del usuario de la bomba de insulina MiniMed para ver las instrucciones completas.

El Servicio de atención al cliente de Bayer está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en el: 1-800-348-8100 www.diabetes.bayer.com

IVD Producto para diagnóstico in vitro.



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA



Medtronic

Bayer, la Cruz de Bayer, CONTOUR y No Necesita Código son marcas comerciales registradas de Bayer.

© 2015 Bayer. Todos los derechos reservados.

Bayer