

Materiales para realizar análisis



Tira reactiva CONTOUR®NEXT de Bayer



Dispositivo de punción MICROLET®2 de Bayer



Lanceta MICROLET® de Bayer



Medidor de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT LINK de Bayer



ADVERTENCIA:


- El medidor y el dispositivo de punción son de un solo uso en un solo paciente. No los comparta ni siquiera con otros miembros de su familia. No lo utilice en varios pacientes.^{1,2}
- Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección.
- Lávese siempre bien las manos con agua y jabón antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Para ver las instrucciones completas sobre la limpieza y la desinfección del medidor y el dispositivo de punción, consulte la guía del usuario del medidor.


Realizar el análisis de sangre

Obtener la gota de sangre

- 1 Introduzca la tira reactiva y espere a que aparezca el mensaje **APLICAR SANGRE**.

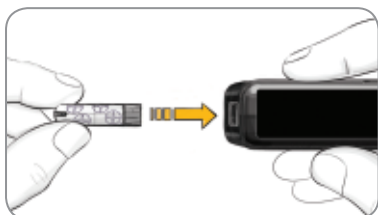

- 2 Saque la cápsula del dispositivo de punción. Introduzca una lanceta en el dispositivo de punción y gire la cubierta protectora para quitarla.

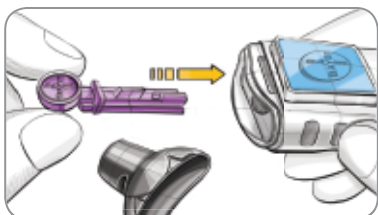

- 3 Vuelva a poner la cápsula de punción y ajústela a la profundidad de punción deseada.



- 4 Obtenga una gota de sangre.



Realizar el análisis de la gota de sangre

- 5 Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor puede pitar dos veces y mostrar el mensaje **TIRA CON MUESTRA INSUFICIENTE**. Tiene unos 30 segundos para aplicar más sangre sobre la misma tira.
- 6 Si AUTOLOG está activado, puede optar por registrar su resultado como: **Antes Comer**, **Desp. Comer** o **Sin Marcar** para el resultado del análisis.



Enviar resultados a un dispositivo Medtronic MiniMed compatible

- 7 Si se ha seleccionado **Confirmar** o **Siempre** en **Opciones de envío** durante la **Configuración**, los resultados se pueden enviar a un dispositivo Medtronic MiniMed compatible. Pulse **OK** para pasar a la siguiente pantalla.



Recordatorio y notas

- 8 Seleccione **Recordar** para configurar un recordatorio para el siguiente análisis. Seleccione **Notas** para agregar más información al resultado. Extraiga la tira reactiva.



Apague el medidor

- 9 Extraiga la tira reactiva y el medidor se apagará en 3 minutos. O mantenga pulsado el botón Menú para apagar el medidor.



Consulte la guía del usuario de CONTOUR®NEXT LINK, el folleto de MICROLET®2 y la guía del usuario del dispositivo Medtronic MiniMed compatible para obtener instrucciones completas.

Llame al **800-348-8100** (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana) para consultar cualquier pregunta que tenga

o visite www.bayerdiabetes.com/us

Exclusivamente para diagnóstico in vitro

Referencias

- ¹ FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens; Initial Communication (2010). <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- ² CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010). <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

Bayer, la cruz de Bayer, CONTOUR, MICROLET y el logotipo de Autocodificación son marcas registradas de Bayer.

© 2012 Bayer. Todos los derechos reservados.



Medtronic

Paradigm y Guardian son marcas registradas, y Revel es una marca comercial de Medtronic MiniMed, Inc.